



orthomol
vision

Überprüfen Sie Ihre Sehfähigkeit anhand des Amsler-Gitter-Tests (siehe Rückseite)

So funktioniert es:

- Patienten mit Sehhilfe tragen diese bitte auch beim Test
- Das Testgitter wird im normalen Leseabstand (ca. 30–40 cm) frontal, also gerade zum Auge, gehalten
- Ein Auge wird mit der Hand abgedeckt
- Mit dem anderen Auge wird der zentrale Punkt im Gitter fixiert
- Danach wird der Test mit dem anderen Auge durchgeführt
- Treten Verbiegungen der Linien und/oder Verzerrungen der Quadrate auf, können das Hinweise auf eine Veränderung der Netzhaut sein
- Bitte nehmen Sie in diesem Fall Kontakt zu Ihrem Augenarzt auf

Amsler-Gitter-Test

